



Instruktion snabbtest Covid-19

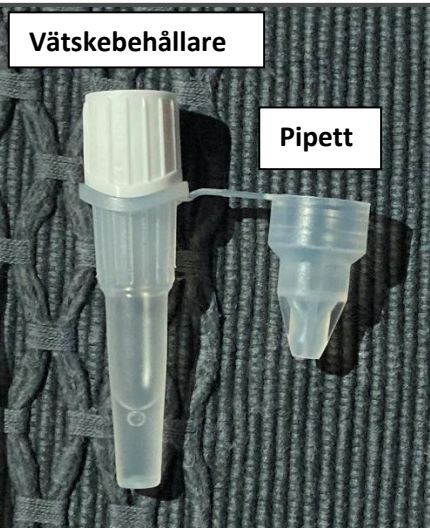
1.  **Sprita händerna**

2.  **Säkerställ att du har följande material:**

- Tops
- Vätskebehållare med pipett
- Resultatbricka

3.  **För in topsen i ena näsborren, rakt in, tills det tar stopp. Vrid den 5 varv.**

- Upprepa topsning i den andra näsborren.

4.  **Vätskebehållare** **Pipett**

- Skruva av det vita locket på vätskebehållaren och rör om topsen i vätskan i 30 sekunder.
- Kläm ihop vätskebehållaren så att topsen vrids ur 5 gånger. Kläm ut en sista gång och släng topsen.
- Skruva fast pipetten på behållaren

5.



- Töm ut 4 droppar av vätskan i nerbukningen till vänster med hjälp av pipetten.

6.

- Låt resultatbrickan ligga plant.
- Vänta 15 - 30 minuter innan du läser av testet.

Negativt
testresultat
för Covid-19



Positivt
testresultat
för Covid-19

C = **Negativt resultat**
C + T = **Positivt resultat**
T = **Testfel, gör nytt test**